

エドワーズ ディスポーザブルノットプッシャー

製品概要

エドワーズディスポーザブルノットプッシャーは、胸部外科手術において、体外の結び目を胸腔内の組織または人工弁等の機器上に押し進めることを目的とした製品です。


| 品番 | 全長 | シャフト長 | シャフト径 |
|-----|------|--------|-------|
| KP1 | 34cm | 21.6cm | 6mm |



Edwards

エドワーズディスポーザブルノットプッシャーの適正使用のために推奨される手順は次の通りです。

1. 片側の糸をノットプッシャーの穴に引っ掛け入れるか通し、助手に渡します。
2. 片手でノットプッシャーを持ち、もう一方の手で固定されていない側の糸を持ち、結び目を作ります。その間、助手は片側の糸に張りを掛けておきます。
3. 両側の糸に張りを加え、結び目と両側の糸がノットプッシャーの先端の溝に沿うようにノットプッシャーを進めます。
4. 結び目が完全に固定されるまで、結び目を落とし込みます。必要に応じて、糸とノットプッシャーの滑りを良くするために生理食塩水をかけてください。
5. 両側の糸の張りを維持しながら、ノットプッシャーを胸腔から引き上げます。
6. 必要な結び目の数に応じて2から5を繰り返します。

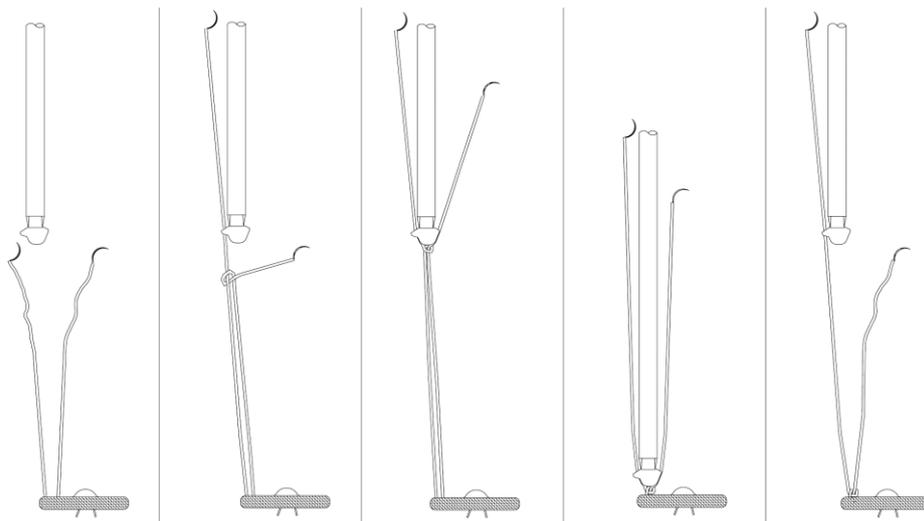

| 販売名 | 品番 | 製造販売届出番号 |
|-----------------------|-----|------------------|
| エドワーズディスポーザブルノットプッシャー | KP1 | 13B1X00231000044 |

※ ご使用の際には製品の添付文書を必ずお読みください。
※ 記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

Edwards、エドワーズ、Edwards Lifesciences、エドワーズライフサイエンスおよび定型化されたEロゴはEdwards Lifesciences Corporationの商標です。その他の商標はそれぞれの商標権者に帰属します。

© 2018 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. EW2018042 1805_0_0000

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

エドワーズライフサイエンス株式会社

本社: 東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 Tel. 03-6894-0500 edwards.com/jp



Edwards